

BIOREDEFINITION · BIOREMODELLIERUNG · BIORESTRUKTURIERUNG



EVERYONE IS A MASTERPIECE.



Caring Innovation

IBSA GROUP

IBSA Pharmaceutical ist ein seit 1945 bestehendes, international tätiges Schweizer Pharmaunternehmen. Spezialisiert auf die Entwicklung von hyaluronsäurebasierten Medizinprodukten für die Dermatologie wurde die dermoästhetische Marke **IBSA Derma** gegründet.

Als einer der führenden Anbieter von Hyaluronsäureprodukten ist **IBSA Derma** weltweit eine der wenigen Firmen, die das Ausgangsmaterial für die firmeneigenen Hyaluronsäureprodukte selbst herstellt.

Das Ausgangsmaterial für alle Hyaluronsäureprodukte wird nach den strengen gesetzlichen Richtlinien der Europäischen Union in einer FDA-zertifizierten Produktionsanlage in Altergon bei Neapel produziert.



EVERYONE IS A MASTERPIECE

Jeder Mensch besitzt natürliche Schönheit. Jeder ist einzigartig - jeder ist ein Meisterwerk. Dies zu bewahren und zu unterstreichen ist unser Anspruch.

Natürliche Schönheit wird betont und perfektioniert, ohne deren Charakter zu verändern. So bleibt jedes Meisterwerk einzigartig.

Keine Gesichter von der Stange. Keine Verfremdung von Form und Ausdruck. Die einzige Referenz für Schönheit ist das eigene Spiegelbild.

QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG

- Kontrolle über den kompletten Herstellvorgang vom Ausgangsmaterial bis zum fertig verpackten Produkt.
- Beste Verträglichkeit durch die ausschließliche Verwendung des patentierten hochreinen Hyaluronpulvers „SHYALT ULTRAPURE“ in allen von IBSA hergestellten Hyaluronsäureprodukten.
- Niedrige Protein- und Endotoxin-Level durch Verwendung des von der Universität Neapel ausgewählten Bakterienstamms Zooepidemicus Equi im patentierten Herstellungsverfahren.
- Hervorragende Verarbeitungsmöglichkeiten und gute Gewebsintegration durch besondere viskoelastische Eigenschaften der Hyaluron-gele.
- Hohe Patientenzufriedenheit.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



HOW IT WORKS

Der Behandlungsansatz zielt darauf ab, der physiologischen Abnahme von Hyaluronsäure im Gewebe durch den Alterungsprozess entgegenzuwirken und somit die Elastizität und Spannkraft der Haut wiederherzustellen.

Das Hydrolift Action System von IBSA Derma bietet eine umfassende Palette an Hyaluronprodukten die unter Verwendung patentierter Technologie hergestellt wurden und in Kombination optimale Bedingungen zur Entschleunigung und Bekämpfung des Alterungsprozesses schaffen. Marken wie PROFHILO®, Viscoderm® oder ALIAXIN® basieren auf dem **Hydrolift Action Konzept**.

Dieses bietet von der Mesotechnik für die oberen Hautschichten über Bioremodellierung bis hin zu Hyaluron-Fillern für jede Indikation das passende Produkt. Die Home-Pflegeserie SKINCARE rundet dieses Konzept, mit aufeinander abgestimmten Produkten, ab.

Dank ausschließlicher innovativer Verwendung des hochreinen Hyaluronpulvers „**SHYALT ULTRAPURE**“ in allen Hyaluronsäureprodukten hat IBSA die Regeln der klassischen Schönheit neu definiert.

„**SHYALT ULTRAPURE**“ wird mittels patentierter Biofermentation von Zooepidemicus Equi, welcher weltweit das Prädikat „Top High Quality“ in Bezug auf Reinheit, Sicherheit und Beständigkeit hat, gewonnen.





BIOREMODELLIERUNG

Bio-Remodellierung mit PROFHILO® ist das neue Anti-Aging Konzept für strahlende Frische und straffe Haut in 5 Minuten.

Müde, feuchtigkeitsarme und erschlaffte Haut profitiert von der sofortigen regenerativen Zweifach-Wirkung.

Die einzigartige Zusammensetzung von PROFHILO® stimuliert die körpereigene Hyaluronsäureproduktion und unterstützt die Elastin- und Kollagenbildung. In-Vitro-Studien belegen auch eine positive Auswirkung auf die Adipozyten-Bildung. Tonus, Festigkeit und Elastizität der Haut werden somit erhöht. Das Ergebnis: Eine dreidimensionale Remodellierung durch Umverteilung von natürlichem Volumen und Symmetrie sowie eine glattere, straffere Haut und ein natürlich frisches Aussehen mit neuer, jugendlicher Ausstrahlung.

PATIENTENWÜNSCHE

- möchte Treatment mit sofortigem Behandlungseffekt
- wünscht schmerzarme und schnelle Behandlung
- legt Wert auf Reinheit und Verträglichkeit der verwendeten Materialien
- möchte gezieltes Anti-Aging praktizieren
- will Hautbild auch zusätzlich zu Botulinum oder Fillern verfeinern, verbessern und verwöhnen
- Unterstützung der Haut bei der Regeneration nach starker Beanspruchung (z.B. nach Sonneneinwirkung)



Die perfekte Ergänzung zum PROFHILO®-Treatment:
PROFHILO HAENKENIUM®

Nähere Infos finden Sie auf der letzten Seite dieser Broschüre.

HydroACTION	●●●●●●
LiftACTION	●●●●○
VERNETZUNGSGRAD	□□□□□
VERFORMBARKEIT	■ ■ ■ ■ ■



Courtesy of Dr. Emma Ravichandran (Glasgow, Scotland)




Courtesy of Dr. Hema Sundaram (USA) and Dr. Antonello Tateo (Italy)

TREATMENT	Gesicht
PRODUKTMENGE	2 ml PROFHILO, BAP-Technik, 29G Nadel

TREATMENT*	Hals
PRODUKTMENGE	2 ml PROFHILO, 10 Punkte-Technik, 29G Nadel


*zusätzliches Treatment:
 Periorale Falten - 1 ml Aliaxin FL
 Lippenvolumen - 1 ml Aliaxin FL

Weitere Anwendungs-Beispiele, Bildmaterial und Infos hierzu:
www.prophilo.net. sowie www.facebook.com/www.prophilo.net.

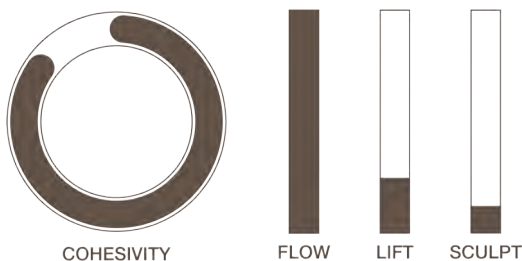

Geltyp	Monophasisch
Molekulargewicht	1.000, 2.000 kDa Hyaluronsäuren
Gehalt vernetzte Na-HA	32 mg/ml
Gehalt an freiem BDDE	< 0,0 ppm
Vernetzungsgrad	0
Nadel	2x 29G x 13 mm
Injektionstiefe	Subdermis

BAP-INJEKTIONSTECHNIK

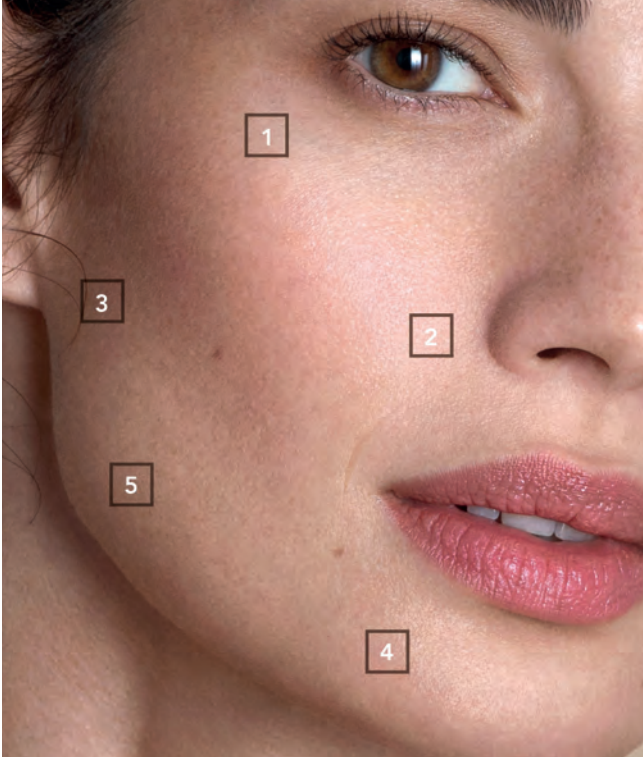

Für eine sichere Anwendung an anderen Arealen wie beispielsweise an Armen, Hals, Dekolleté und Handrücken gibt es ebenfalls spezielle Anwendungstechniken. Diese finden Sie unter www.prophilo.net/die-behandlung/.

VERTEILUNG IM GEWEBE

Beide 3D-Bilder* wurden 15 Minuten nach der PROFHILO® BAP-Gesichts- und Halsbehandlung aufgenommen. Mit Hilfe eines Farb-codes der QuantifiCare-Software-Suite können Volumenänderungen gemessen und sichtbar gemacht werden.


Gelb zeigt eine positive Volumenänderung gegenüber der vor der Behandlung aufgenommenen 3D-Fotos an, womit die Verteilbarkeit von PROFHILO® bestätigt wird. Rot zeigt eine größere Volumenänderung an den gegen Ende der Behandlung injizierten Punkten an.

Die Behandlung mit PROFHILO® ist kurz, schonend und kaum zu spüren. Durch seine besondere Beschaffenheit sowie der speziellen BAP-Injektionstechnik (Bio Aesthetic Points) verteilt sich PROFHILO® von selbst im Gewebe. So profitiert die gesamte Gesichtshaut von der feuchtigkeitsbindenden Wirkung hochkonzentrierter (64 mg / 2 ml) Hyaluronsäure.

Mit nur 5 Injektionen je Gesichtshälfte mit feiner Nadel (29G TW) ermöglicht diese unaufwendige Technik das Fluten des gesamten Gesichts mit PROFHILO®.

An den besonders aufnahmefähigen BAP-Punkten werden je Injektionspunkt 0,2 ml Produkt als Bolus gesetzt. Dies erlaubt die flächige Diffusion von PROFHILO® in der Subdermis und bewirkt ein natürliches und anhaltend frisches Aussehen.

Ein Behandlungszyklus besteht aus zwei Anwendungen mit einem Monat Abstand. Abhängig von der Beschaffenheit der Haut kann eine dritte Anwendung nach weiteren 4 Wochen erfolgen. Für anhaltende Ergebnisse werden 2 Behandlungszyklen pro Jahr empfohlen.

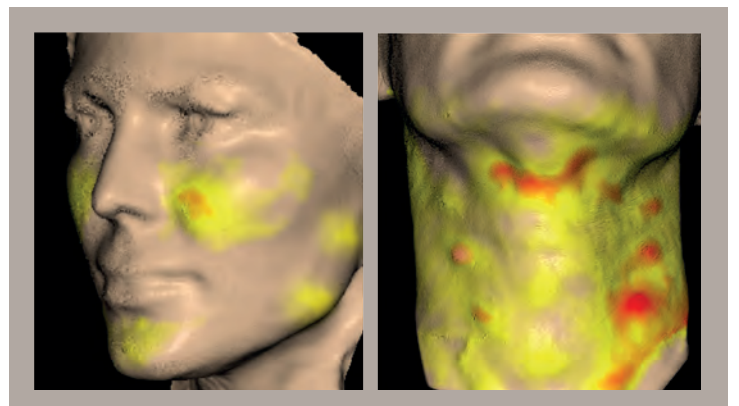

*aufgenommen mit 3D LIFEVIZ® Mini Camera von QuantifiCare


BIOKOMPATIBEL & HOCHDOSIERT

PROFHILO® weist eine einzigartige Formulierung auf. Unter Hitzeeinwirkung verbindet sich hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure zu einem Hybridmolekül. Weitere Zusatzstoffe (wie z. B. BDDE) sind durch dieses thermische Verfahren nicht nötig. Das Ergebnis ist eine hochreine Hyaluronsäure, die die Haut durch eine stark wasseranziehende Wirkung von innen mit Feuchtigkeit flutet, die körpereigene Hyaluronsäureproduktion stimuliert und die Elastin- und Kollagenbildung unterstützt. In-Vitro-Studien belegen auch eine positive Auswirkung auf die Adipozyten-Vitalität.

Aufgrund des besonderen Herstellungsprozesses verbleibt PROFHILO® im Gegensatz zu unvernetzter Hyaluronsäure erheblich länger im Gewebe und entfaltet dort über vier Wochen seine hydratisierende und stimulierende Wirkung. Es enthält 64 mg Hyaluronsäure auf 2 ml Produkt und ist damit eines der höchst konzentrierten Hyaluronprodukte auf dem Weltmarkt. Der Verzicht auf Zusatzstoffe steht für beste Verträglichkeit und minimiert das Risiko von Nebenwirkungen. PROFHILO® kann mit allen gängigen Fillern, PRP, Laser- und Botulinumbehandlungen kombiniert werden.

KERATINOZYTEN-FIBROBLASTEN

PROFHILO® stimuliert und steigert die Elastin-Bildung.

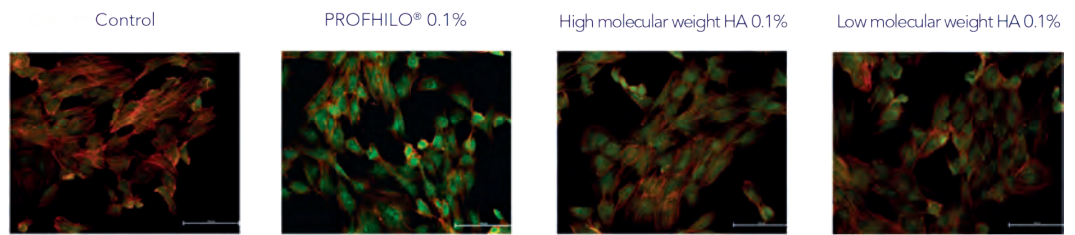


In vitro keratinocytes-fibroblasts immunofluorescence pictures relative to elastin expression¹

● Elastin

ADIPOZYTEN

PROFHILO® unterstützt die Viabilität.

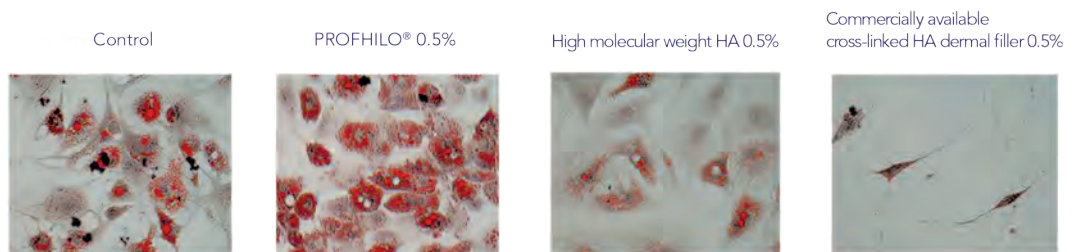

In vitro Oil Red O staining performed on Adipocyte Stem Cells in adipogenic medium, 14 days after incubation²

● Fat deposits Courtesy of Bioteknet

VISCODERM® hydrobooster



Der neue Behandlungsansatz für Stirnfalten, Krähenfüße und Barcodes (Oberlippenfältchen). Die HYDROSTRETCH Action ermöglicht nun auch für dynamische Falten natürliche Ergebnisse.

Hydratation und Stretching - der VISCODERM® hydrobooster vereint die biologische Wirkkraft der Hyaluronsäure mit einem Stretching-Effekt der Haut.

Für natürliche Behandlungsergebnisse an besonders dynamischen Arealen wie z.B. perioral, periokular und der Stirn sorgt HYDROSTRETCH Action für die tiefe Hydratisierung und Stimulation von Restrukturierungsvorgängen der Haut. Gleichzeitig können Falten nicht nur angehoben, sondern auch durch Dehnung (Stretching) geglättet werden.

Die hohe Elastizität und Verformbarkeit sowie eine optimale Gewebsintegration erlauben die Anwendung in verschiedenen Ebenen der Dermis. Speziell Falten in oberflächlichen Schichten der Dermis können geglättet werden ohne ungewünschtes Volumen aufzubauen.

Je nach Grad der Hautalterung und Faltengrad werden unterschiedliche Injektionstechniken empfohlen (*siehe nächste Seite*). Das Protokoll sieht 2 Behandlungen im Abstand von 8 Wochen vor. Die Behandlung sollte 2x pro Jahr durchgeführt werden.


ANWENDUNGSAREALE

- Periorale Falten, z.B. Lippenfältchen
- Periokulare Falten, Krähenfüße
- Glabellafalten
- Stirnfalten

KLINISCHER NACHWEIS


HydroACTION	●●●●●
LiftACTION	●●○○○
VERNETZUNGSGRAD	■□□□□
VERFORMBARKEIT	■●■●■□

Studie zum Nachweis der Wirksamkeit bei Reduzierung dynamischer und statischer Falten.

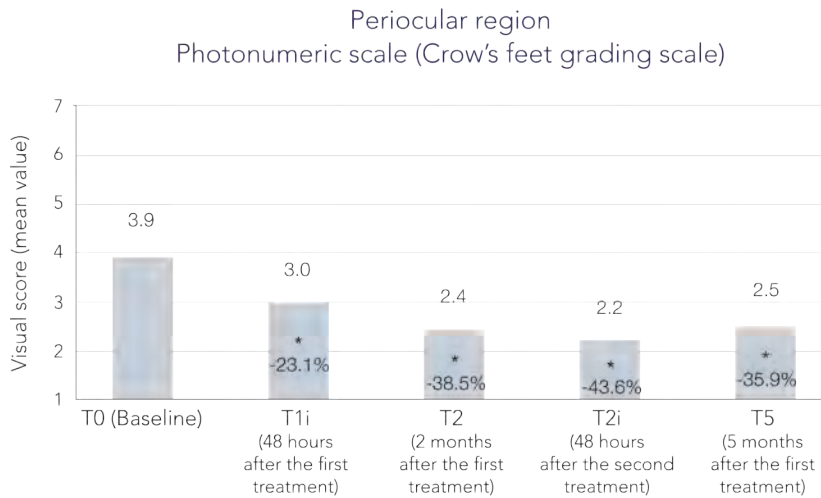

*P<0.05 vs T0

Modified from Sparavigna 2019

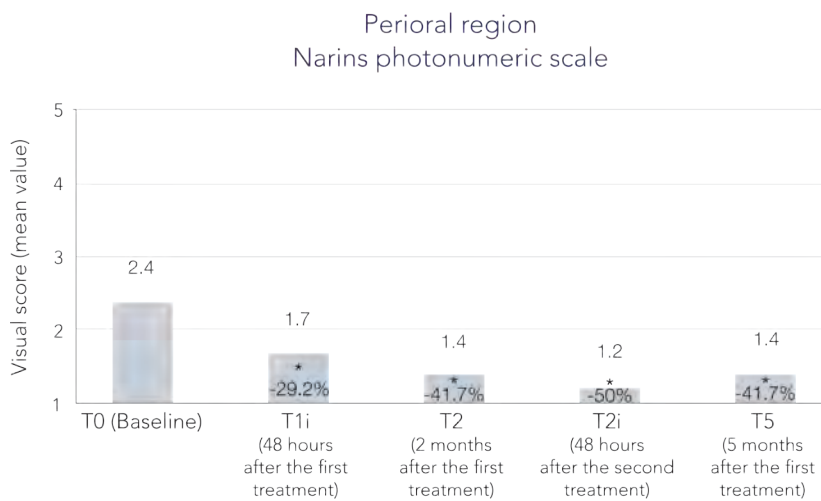

*P<0.05 vs T0

Modified from Sparavigna 2019



- Geltyp Monophasisch
- Molekulargewicht 1.000, 2.000 kDa Hyaluronsäuren
- Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml
- Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm
- Vernetzungsgrad +
- Nadel 2x 29G x 13 mm
2x 33G x 9 mm (Kit)
- Injektionstiefe indikationsabhängig

VISCODERM® hydrobooster

DIE ANWENDUNGSTECHNIKEN

VISCODERM® hydrobooster ist die einzige injizierbare stabilisierte Hyaluronsäure, die eine Doppelfunktion bietet. Diese wird durch ihre speziellen rheologischen Eigenschaften ermöglicht.

Die geringe Gelsteifigkeit und Viskosität sowie die hohe Verformbarkeit garantieren eine optimale Gewebsintegration und erlauben die Verwendung in verschiedenen Ebenen der Dermis. Die spezielle MicroTröpfchen-Technik erlaubt eine Glättung von Fältchen ohne unerwünschten Volumenaufbau. Aus diesem Grund ist VISCODERM® hydrobooster besonders für Fältchen in den dynamischen Bereichen des Gesichts geeignet.

HYDRATION

und Geweberestrukturierung

+

STRETCH

mechanische Wirkung


bei oberflächlichen Falten

=

HYDROSTRETCH-ACTION

HYDRATION

MICROLINEAR RETROGRADE ODER MICROBOLUS TECHNIK

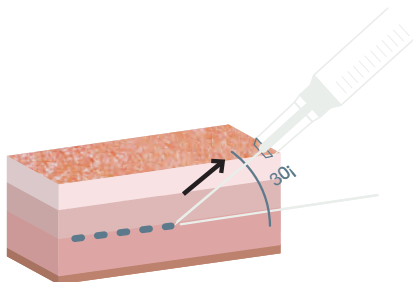

1 MONAT NACH 1. BEHANDLUNG




Courtesy of Dr. P. Piersini

Zur Tiefenhydratation wird VISCODERM® hydrobooster mittels linear-retrograder Technik oder MicroTröpfchen Technik (je Bolus <0,05 ml) subdermal injiziert.


STRETCH

MICROTRÖPFCHEN TECHNIK

Für oberflächliche Falten (Glogau-Skala Typ 2: Falten nur bei Mimik) werden mehrere MicroTröpfchen-Injektionen (jeweils $<0,01$ ml) entlang des Faltenbodens gesetzt. So wird die Falte aufgedehnt (Stretching) und geglättet, ohne Volumen aufzubauen.

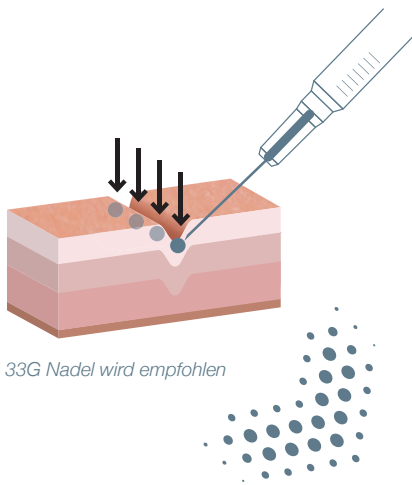


33G Nadel wird empfohlen

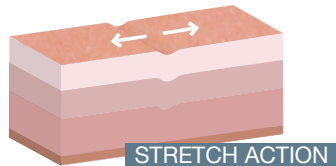


STRETCH ACTION

3 MONATE NACH 2. BEHANDLUNG

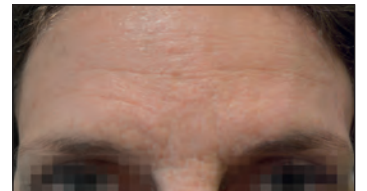

Courtesy of Dr. P. Piersini

3 MONATE NACH 2. BEHANDLUNG

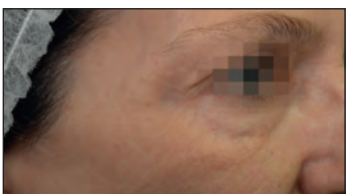


Courtesy of Dr. P. Piersini

DUODYNAMIK TECHNIK


Tiefere Falten (Glogau-Skala Typ 3: Falten auch in entspanntem Zustand) werden zunächst mittels Micro linear-retrograder Technik angehoben und anschließend mit der MicroTröpfchen-Technik (jeweils $<0,01$ ml) aufgedehnt.

Auf Grund des hochelastischen Materials und der daraus möglichen minimalen Produktmenge wird selbst im Bereich der Lachfältchen ein sehr natürliches Ergebnis ohne „Maskeneffekt“ erzielt.

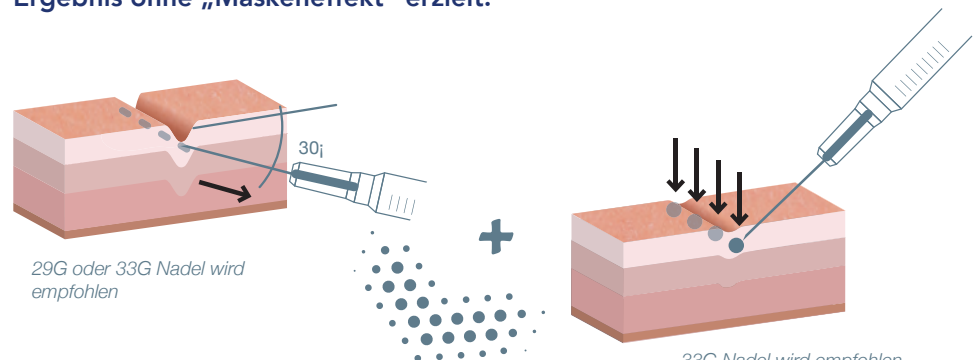


29G oder 33G Nadel wird empfohlen

33G Nadel wird empfohlen

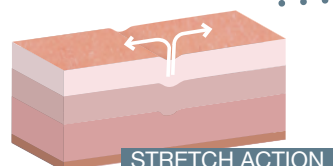

STRETCH ACTION

Aliaxin®

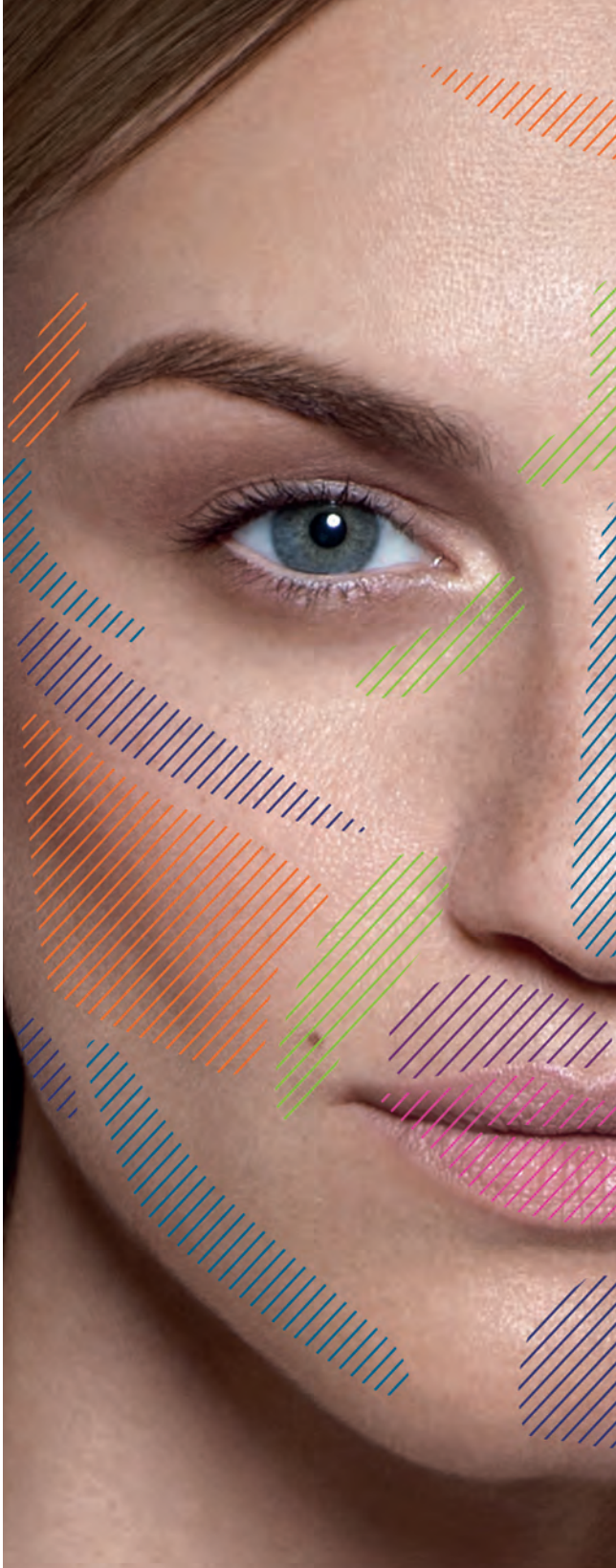

BIOREDEFINITION: THE ART OF CONTOUR

Vitale Haut, straffe Gesichtskonturen, eine verbesserte Symmetrie sowie Elastizität und Feuchtigkeit: Dies sind die ästhetischen und therapeutischen Resultate einer Anwendung der ALIAXIN®-Produktreihe. ALIAXIN® steht für einen natürlichen Lifting- und Fülleffekt und macht sich dazu die biologische Wirkkraft der Hyaluronsäure zur Stimulation von Reparaturvorgängen in der Kollagenstruktur der Haut zunutze.

Gestützt auf aufwendige wissenschaftliche Untersuchungen der IBSA Pharma Group wurden Hyaluronsäuren mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Vernetzungsgraden kombiniert.

Das Resultat sind 6 Formulierungen, die alle Anforderungen im Bereich der ästhetischen Gesichtsbildung mit Hyaluronsäure in optimaler Weise für höchste Ansprüche erfüllen und in Bezug auf Gewebsintegration und Patientensicherheit nahezu unerreichbar sind.

Die ALIAXIN®-Produktreihe maximiert die klinische Wirksamkeit und die zu erwartenden ästhetischen Ergebnisse für die optimale Zufriedenheit Ihrer Patienten.

OPTIMALE GEWEBSINTEGRATION


Die hohe Elastizität sowie die niedrige Viskosität des Gels zeichnen dieses Gel aus. ALIAXIN® integriert sich effektiv ins Gewebe. Entzündliche Gewebsveränderungen sind auf ein Minimum reduziert.

IN-VIVO RESULTATE*

ALIAXIN® GP

MONOPHASISCHES GEL

BIPHASISCHES GEL

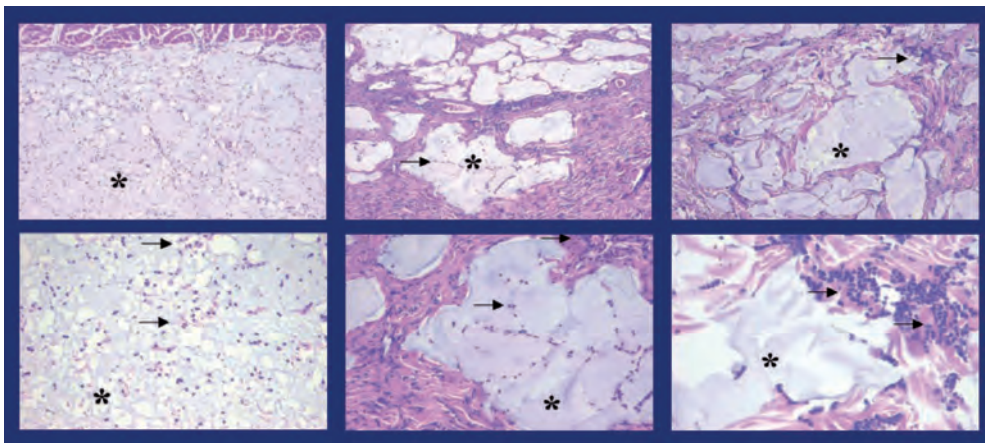

GEWEBSINTEGRATION
(4fach vergrößert)

ENTZÜNDUNGSREAKTION
(10fach vergrößert)

Histologische Analyse nach intradermaler Injektion: Vergleich verschiedener HA-Füllstoffe⁴

★ Gel

> entzündete Zellen (dunkelviolet)

Die Technologie hinter ALIAXIN® konzentriert sich auf die physikalischen Parameter des Vernetzungsprozesses, um die Verwendung und folglich den finalen Verbleib von BDDE in der Formulierung zu minimieren (<0,1 ppm).

Die Kombination von Hyaluronsäure mit unterschiedlichen Molekulargewichten stabilisiert die Formation während des Vernetzungsprozesses und unterstützt die biologischen und physiologischen Funktionen der Haut.

*aus Guineapigs

Aliaxin®

RHEOLOGISCHE PRODUKT-MERKMALE

HOHER G'-WERT:
TIEFE HAUTSCHICHTEN

NIEDRIGER G'-WERT:
OBERFLÄCHLICHE HAUTSCHICHTEN

Aliaxin®SR
SHAPE & RESTORE


G' 39 Pa

Aliaxin®FL
FINE LINES & LIPS

G' 45 Pa

Aliaxin®GP
GLOBAL PERFORMANCE

G' 95 Pa

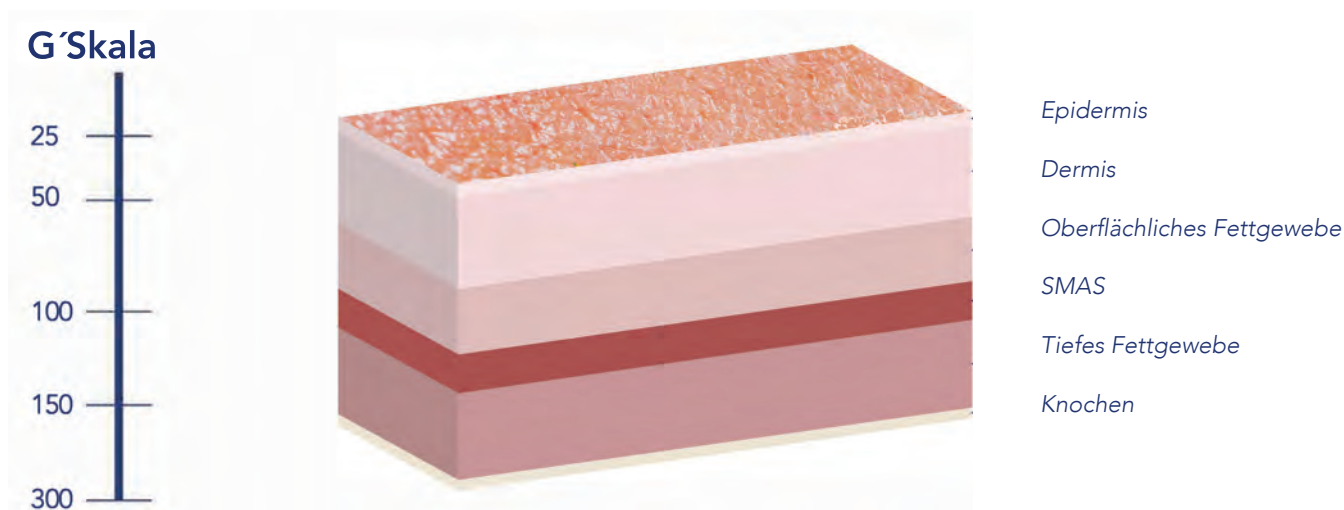

VOLUTION

Aliaxin®LV
LIPS VOLUME

G' 107 Pa

Aliaxin®EV
ESSENTIAL VOLUME

G' 162 Pa

Aliaxin®SV
SUPERIOR VOLUME

G' 295 Pa

KOHÄSIVITÄT misst die Bindungskräfte zwischen den Gelpartikeln und ist ein Maßstab für die Gewebsintegration.

FLIESSFÄHIGKEIT misst das Verhältnis zwischen Elastizität und Viskosität und ist ein Maßstab für die Fließfähigkeit des Gels.


LIFTINGEFFEKT(G') misst die Elastizität des Gels und gibt so die Fähigkeit des Gels aufgrund seiner Härte, Volumen aufzubauen und Defizite zu füllen, wieder.

PLASTIZITÄT misst die Verformbarkeit des Gels und seine Fähigkeit modelliert zu werden.

GUIDE to PRODUCT SELECTION


Die grundlegenden Produktmerkmale, die die ALIAXIN®-Produktreihe auszeichnen sind die vielfältigen Kombinationen von Hyaluronsäure unterschiedlicher Molekulargewichte, die hohe Kohäsivität für beste Gewebsintegration sowie die hohe Reinheit der HA. Diese Eigenschaften bieten ein Höchstmaß an Sicherheit¹⁾ in Bezug auf Verträglichkeit.

Aliaxin® SR

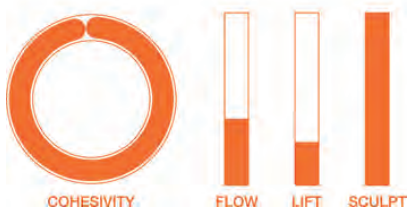

Dreidimensionales Remodelling, Erhöhung von Festigkeit und Elastizität der Haut

Aliaxin® FL

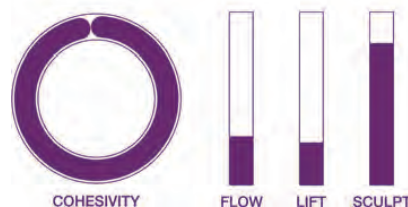


Orale Kommissuren, periorale Falten, natürliche Redefinition der Lippe, „Lip Gloss Effekt“

Aliaxin® GP




Lifting und Hydratisierung von Naso-labial- und Marionettenfalten sowie orale Kommissuren

Aliaxin® LV

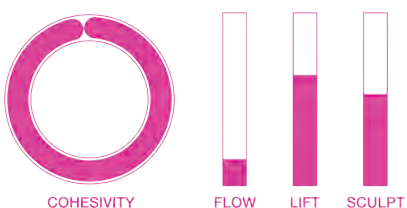


Definition Lippenrot, harmonische Vergrößerung des Lippenvolumens

Aliaxin® EV

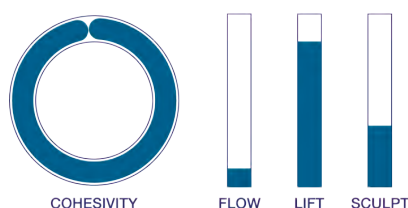

Für eine subkutane Volumenggebung im Bereich Wange, Nase, Kinn und Kinnlinie

Aliaxin® SV

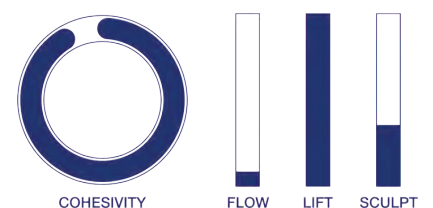

Supraperiostale Korrektur von starken Volumendefiziten, Redefinierung Konturen an Wange und Kinnlinie

Aliaxin® SR

SHAPE & RESTORE



Hyaluronsäuregel zur Wiederherstellung verlorenen Volumens sowie für natürliche und straffe Konturen.

Die besonderen Fließigenschaften von ALIAXIN® SR ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung im Gewebe und damit auch die Behandlung größerer Gesichtsareale.

Das ästhetische Ergebnis beruht auf der synergistischen Wirkung des Gels, welches nachlassender Spannung der Haut entgegenwirkt, den Biostrukturierungsprozess aktiviert sowie die Bildung von neuem Kollagen unterstützen kann. Dies sorgt für langanhaltende und stabile Behandlungsergebnisse.

Die enthaltene natürliche Hyaluronsäure unterstützt die regenerative Wirkung des Produkts durch eine anhaltende Durchfeuchtung tieferer Hautschichten. Die Haut wirkt dadurch natürlicher und ebenmäßiger.

ANWENDUNGSAREALE

- Dreidimensionale dermale Remodellierung (Umverteilung von Volumen und Symmetrie)
- Erhöhung von Tonus, Festigkeit und Elastizität der Haut

HydroACTION	●●●●○
LiftACTION	●●●○○
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ □ □ □
VERFORMBARKEIT	■ ■ ■ ■ ■



Courtesy of Dr. A. Tateo

TREATMENT* Wangenaufbau

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin SR je Seite

*zusätzliches Treatment:
Nasolabialfalte - 0,5 ml Aliaxin GP je Seite



Courtesy of Dr. A. Tateo

TREATMENT* Schläfen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin SR je Seite
in obere Hautschicht

*zusätzliches Treatment:
Schläfe - 0,5 ml Aliaxin EV je Seite in tiefe Hautschicht



Geltyp	Monophasisch
Molekulargewicht	500, 1.000, 2.000 kDa Hyaluronsäuren
Gehalt vernetzte Na-HA.....	22,5 mg/ml
Gehalt natürlicher Na-HA...	2,5 mg/ml
Gehalt an freiem BDDE	< 0,1 ppm
Vernetzungsgrad.....	++
Nadel	2x 30G x 13 mm 2x 27G x 19 mm
Injektionstiefe.....	mittlere Dermis



Ideal für die Behandlung gängiger altersbedingter Falten im Gesicht sowie zur lokalen Volumenauffrischung. Bestens geeignet auch für kleine Touch-Up-Behandlungen.


Die lange Verweildauer²⁾ im Gewebe ist ein besonderer Vorzug von ALIAXIN® GP. Das Gel sorgt für eine tiefe Hydratisierung und hat durch seine besondere Formulierung eine hervorragende Lifting-Wirkung. Entwickelt für die Behandlung moderater Falten und für die lokalisierte Volumenauffüllung aller Gesichtsareale, die die dreidimensionale Gesichtsform charakterisieren und betonen. Bestens geeignet auch für Touch-Up-Behandlungen zur Erhaltung des Behandlungsergebnisses. Somit ist ALIAXIN® GP der klassische Allrounder für alle gängigen Behandlungswünsche.

Das Gel verfügt über eine hervorragende Viskosität und Plastizität für eine anwenderfreundliche intradermale Behandlung mit hoher Patientenzufriedenheit.

ANWENDUNGSAREALE

- Nasolabialfalten
- Orale Kommissuren
- Glabellafalten
- Marionettenfalten
- Verbesserung des Volumens im Kinn- und Wangenbereich

HydroACTION	● ● ○ ○ ○
LiftACTION	● ● ● ● ○
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ ■ ■ □
VERFORMBARKEIT	■ ■ ■ □ □

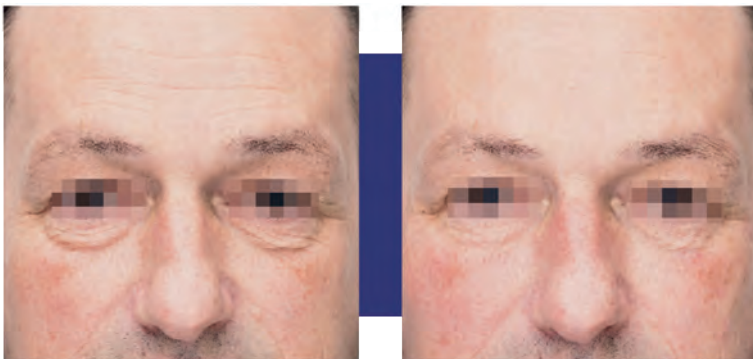

Courtesy of Dr. B. Molina

TREATMENT* Tränenrinne

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin GP je Seite

*zusätzliches Treatment:
Periokulare Falten - 1 ml Aliaxin SR je Seite



Courtesy of Dr. A. Tateo

TREATMENT Glabella

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin GP

Aliaxin® GP



Geltyp Monophasisch

Molekulargewicht 1.000 kDa, 2.000 kDa
Hyaluronsäuren

Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml

Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm

Vernetzungsgrad ++++

Nadel 2x 27G x 13 mm
2x 27G x 19 mm

Injektionstiefe mittlere und tiefe Dermis

Aliaxin® EV

ESSENTIAL VOLUME



Hyaluronsäuregel zum Volumenaufbau für ein natürliches Aussehen und eine symmetrische Gesichtsforn.

ALIAXIN® EV ist das ideale Produkt für die Verjüngung von Patienten, bei denen das natürliche Gesichtsvolumen bereits nachläßt.

Perfekte Proportionen der Gesichtspartien Wangen, Kinn und Kinnlinie sind ausschlaggebend für ein frisches und jugendliches Aussehen sowie ebenmäßige Gesichtszüge. Speziell zur Behandlung dieser Areale wurde ALIAXIN® EV entwickelt.

Mit seinen hervorragenden Lifting-Eigenschaften und der guten Diffusion in der Subkutis ermöglicht dieses Produkt einzigartige Behandlungsergebnisse für ein jugendliches und natürliches Aussehen Ihrer Patienten.

ANWENDUNGSAREALE

Volumenaufbau im Bereich von

- Wangen
- Kinn
- Kinnlinie
- Unteres Gesichtsdrittel

HydroACTION	● ○ ○ ○ ○
LiftACTION	● ● ● ● ●
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ ■ ■ ■
VERFORMBARKEIT	■ ■ □ □ □



Courtesy of Dr. G. Salt

TREATMENT* Kinnlinie

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin EV je Seite

*zusätzliches Treatment:
Kinn - 1 ml Aliaxin SV




Courtesy of Dr. A. Tatec

TREATMENT* Wangenknochen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin EV je Seite

*zusätzliches Treatment:
Lippenvolumen - 1 ml Aliaxin LV

Aliaxin® EV

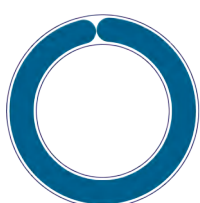

COHESIVITY



FLOW



LIFT



SCULPT

Geltyp Monophasisch

Molekulargewicht 1.000 kDa, 2.000 kDa
Hyaluronsäuren

Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml

Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm

Vernetzungsgrad +++++

Nadel 2x 27G x 13 mm
2x 27G x 19 mm

Injektionstiefe tiefe Dermis

Aliaxin® SV

SUPERIOR VOLUME



Hyaluronsäuregel zur Formung und Projektion von besonders von Volumenverlusten betroffenen Arealen

ALIAXIN® SV ist für die Behandlung ausgeprägter Volumenverluste konzipiert worden. Es hat optimale rheologische Eigenschaften, die eine Formung und Projektion abgesunkener Gesichtspartien erlauben und signifikante Volumenverluste ausgleichen. Das Produkt weist eine hohe Hebekapazität und eine geringe Fließeigenschaft auf. Daher verbleibt es sehr gut an Ort und Stelle und kann den darüber liegenden Hautmantel optimal anheben und zur Akzentuierung abgeflachter Partien eingesetzt werden.

ALIAXIN® SV ist speziell für die Injektion mit der Nadel auf den Knochen vorgesehen. Patienten mit dickerer Haut bzw. ausreichender Gewebsabdeckung sind besonders für die Anwendung geeignet.

ANWENDUNGSAREALE

Volumenaufbau im Bereich von

- Wangenknochen
- Kinn
- Kieferwinkel



HydroACTION	● ○ ○ ○ ○
LiftACTION	● ● ● ● ●
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ ■ ■ ■
VERFORMBARKEIT	■ □ □ □ □



Courtesy of Dr. G. Salti

TREATMENT* Mandibularbogen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin SV je Seite


*zusätzliches Treatment:
Lippenvolumen - 1 ml Aliaxin LV



Courtesy of Dr. G. Salti

TREATMENT Wangenknochen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin SV je Seite

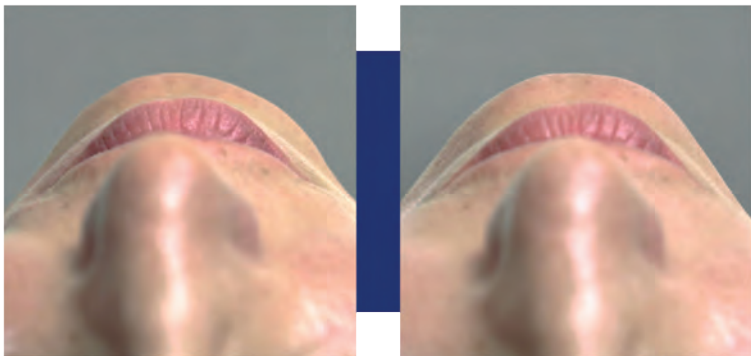

Courtesy of Dr. A. Tateo

TREATMENT Kinn-Symmetrie

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin SV

Aliaxin® SV



COHESIVITY



FLOW



LIFT



SCULPT

Geltyp Monophasisch
 Molekulargewicht 2.300 kDa
 Hyaluronsäuren
 Gehalt vernetzte Na-HA.... 25 mg/ml
 Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm
 Vernetzungsgrad..... +++++
 Nadel 2x 27G x 13 mm
 2x 27G x 19 mm
 Injektionstiefe..... tiefe Dermis

Aliaxin® FL

FINE LINES & LIPS



Wohlgeformte, volle Lippen für jugendliches Aussehen und natürliche Schönheit.

Die kleinen Knitterfältchen im Bereich zwischen Oberlippe und Nase prägen sich im Laufe der Jahre immer stärker ein. Die besonders softe Konsistenz von ALIAXIN® FL polstert dieses schwierig zu behandelnde Areal sanft und sicher auf.

Auch für beginnende orale Kommissuren kann ALIAXIN® FL verwendet werden. Es schafft weiche Übergänge und beseitigt zuverlässig Volumendefizite.

Die gleichmäßige Verteilung des Gels in der Lippenschleimhaut ermöglicht weiche vollere Lippen sowie eine harmonische Definition des Lippenrots und der Lippenkontur. Die Lippen wirken natürlich und durch die hydratisierende Wirkung voller und frischer.

Die Verwendung einer 30 G-Kanüle erhöht den Behandlungskomfort für den Patienten.

ANWENDUNGSAREALE

- Definition des Lippenrots
- Orale Kommissuren
- Periorale Falten

HydroACTION	●●●○○
LiftACTION	●●●○○
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ ■ □ □
VERFORMBARKEIT	■ ■ ■ ■ □



Courtesy of Dr. A. Tatec

TREATMENT Lippen-Kontur & leichtes Volumen


PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin FL



Courtesy of Dr. A. Tatec

TREATMENT Lippen-Redefinition

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin FL

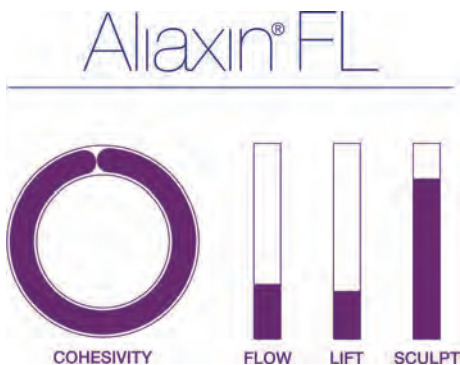

Geltyp Monophasisch
 Molekulargewicht 500 kDa, 1.000 kDa Hyaluronsäuren
 Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml
 Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm
 Vernetzungsgrad +++
 Nadel 4x 30G x 13 mm
 Injektionstiefe mittlere Dermis

Aliaxin® LV

LIPS VOLUME



Schöne Lippen sind ein Blickfang in jedem Gesicht. Wohlproportionierte Formen sowie ein optimales Volumenverhältnis zwischen Ober- und Unterlippe sind häufige Wünsche von Patienten.

ALIAXIN® Lips Volume ist das Produkt der Wahl, wenn ein harmonischer Volumenaufbau der Lippe gewünscht wird. Das Material verteilt sich durch die besonderen Fließeigenschaften gleichmäßig in der Mukosa. Es zeichnet sich durch eine hohe Widerstandskraft gegen die Beanspruchung durch die ständigen Muskelbewegungen des Mundes aus.

Neben dem Volumenaufbau des Lippenrots kann ALIAXIN® LV ebenso für die Anhebung der Mundwinkel, den Aufbau des Cupids Bow (Amorbogen) und einer Betonung der Lippenkontur eingesetzt werden.

Der vielen Patienten wichtige „natural look“ bleibt erhalten. Dies ist der weichen und geschmeidigen Konsistenz des Gels geschuldet, welches speziell für die sensible Lippenregion kreiert wurde.

ANWENDUNGSAREALE

- Aufbau des Lippenvolumens
- Definition des Cupid Bow
- Behandlung der Lippenkontour

HydroACTION	●●●○○
LiftACTION	●●●●○
VERNETZUNGSGRAD	■ ■ ■ ■ □
VERFORMBARKEIT	■ ■ ■ □ □



Courtesy of Dr. M. Zazzaron

TREATMENT Lippenvolumen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin LV



Courtesy of Dr. G. Salt

TREATMENT Lippenvolumen

PRODUKTMENGE 1 ml Aliaxin LV

Aliaxin[®] LV



COHESIVITY



FLOW



LIFT



SCULPT

Geltyp Monophasisch

Molekulargewicht 500 kDa, 1.000 kDa
Hyaluronsäuren

Gehalt vernetzte Na-HA 25 mg/ml

Gehalt an freiem BDDE < 0,1 ppm

Vernetzungsgrad..... +++++

Nadel 2x 27G x 13 mm
2x 27G x 19 mm

Injektionstiefe..... mittlere Dermis

VISCODERM®
skinkò

VISCODERM®
skinkò e



Reichhaltiger Anti-Aging-Komplex für eine sichtbar jüngere, gesündere und ebenmäßigere Haut mit mehr Ausstrahlung.

Viscoderm®SKINKO / Viscoderm®SKINKO E sind reichhaltige Anti-Aging-Komplexe mit mehr als 50 hautfunktionsunterstützenden Elementen wie Aminosäuren und Vitaminen sowie unvernetzter Hyaluronsäure.


Viscoderm®SKINKO / Viscoderm®SKINKO E sind für jeden Hauttyp sowie Patienten jeden Alters geeignet und werden je nach Indikation und Körperregion mit verschiedenen Injektionstechniken in die Haut eingebracht.

Einsatz findet dieses Power-Serum als wertvolles Solo-Treatment oder in Kombination mit anderen Injektionstherapien.

PATIENTENWÜNSCHE

- Wunsch nach ebenmäßigerem Hautbild
- Verbesserung der Hautfestigkeit und Elastizität
- Schutz und Reparatur von Sonnenschäden (Pigmentierungen)
- Glättung des Oberflächenreliefs der Haut
- Verbesserung der Tiefenhydratisierung
- Power-Treatment zur Erhaltung und Verbesserung der Hautqualität

BIOCOMPLEMENTATION: ANTI-AGING-KOMPLEX + HYALURONSÄURE

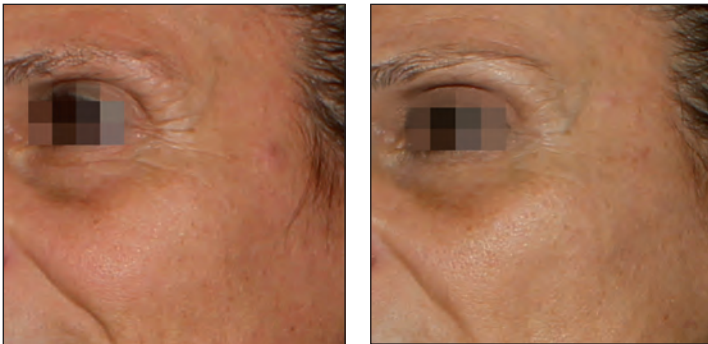

Glättung der Augenfältchen und Linderung Hautirritationen nach UV-Einwirkung



Korrektur von Pigmentveränderungen

Viscoderm®SKINKO / Viscoderm®SKINKO E enthalten die selben hautfunktionsunterstützenden Elemente, unterscheiden sich lediglich in der Konzentration ihrer Hyaluronsäure. Viscoderm®SKINKO wurde für die jüngere Haut mit wenig Sonnenschäden sowie für die Partie rund um die Augen (wo auf hohe Hyaluronsdosierungen auf Grund zu starker Wasserbindung verzichtet werden sollte) entwickelt.

Viscoderm®SKINKO E ist ideal für alle Hauttypen mit Knitterfältchen, Pigmentierungen und sonstigen alters- und UV-bedingten Unregelmäßigkeiten.

Das Anwendungsprotokoll sieht 4 Behandlungen im Abstand von je 3 Wochen vor. Zwei Behandlungszyklen pro Jahr werden empfohlen. Injiziert wird in die oberflächliche Dermis. Indikationen sind Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände. Die Anwendung an anderen Körperarealen ist ebenfalls möglich.

INHALTSSTOFFE

Viscoderm® SKINKO enthält 2 mg Hyaluronsäure je 5ml-Vial

Viscoderm® SKINKO E enthält 32 mg Hyaluronsäure je 5ml-Vial

Mineralien: Kalzium, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Zink, Ammonium, Kalium, Natrium, Zinn

Aminosäuren: Alanin, Arginin, Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glutaminsäure, Glutamin, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin

Vitamine: Biotin (B8), Pantothensäure (B5), Folsäure (B9), Inositol (B7), Nicotinamid (B3), Pyridoxin (B6), Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Vitamin B12

INJEKTIONS-TECHNIKEN

Mesotechnik, Nappage, Criss-Cross-Technik, Fächertechnik, linear-retrograde Injektionen, Anwendung mit Hilfe transdermaler Systeme

VISCODERM®
skinkò

VISCODERM®
skinkò e

HOW IT WORKS

Viscoderm®SKINKO / Viscoderm®SKINKO E erhalten und verbessern die Ernährungs- und Stoffwechselfunktionen in der Epidermis und der papillären Dermis. Dabei bekämpfen sie die Ursachen und Folgen der Hautalterung und wirken antioxidativ^{3),4)}.

Die Stimulation der Fibroblasten trägt zur Erhaltung der Hautelastizität bei, während die Wirkung auf die Keratinozyten die Schutzbarriere der Haut verbessert und damit den Schutz vor Umwelteinwirkungen mobilisiert.

Das Ergebnis ist eine sichtbar jüngere, gesündere Haut mit frischer Ausstrahlung und homogenem Farbton. Denn gesunde Haut ist schöne Haut!

KLINISCHE STUDIEN

Vier Biocomplementation Behandlungen wurden an Wangen, Nacken, Händen und Dekolleté von 59 Patienten (37-60 Jahre) vorgenommen.

TIMELINE

Basisbesuch (T0), nach 3 Wochen (TW3), nach 6 Wochen (TW6) und nach 9 Wochen (TW9).

AUFHELLENDE WIRKUNG

TIEFE HYDRATION

VERBESSERUNG HAUTBILD


SCHUTZ VOR UND REPARATUR VON UV-SCHÄDEN



1 Packung Viscoderm®SKINKO / Viscoderm®SKINKO E enthält 10 Vials á 5 ml.

AUFHELLENDE WIRKUNG:

16% ANSTIEG DES HAUTAUFHELLENDEN EFFEKTS

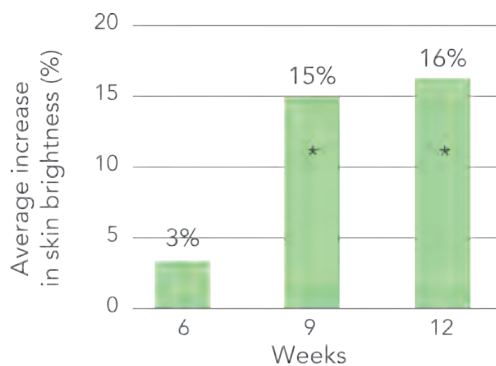

Analyse der Änderung des sichtbaren Spektrums zur Basislinie.


*Dunnett-Test (P <0,05 vs T0)

Modifiziert von Sparavigna et al. 2015

Statistisch signifikante Verbesserung der Ebenmäßigkeit des Hauttons nach 3 Behandlungen.

SCHUTZWIRKUNG UV-STRAHLUNG:

36,6% WENIGER SONNENSCHÄDEN

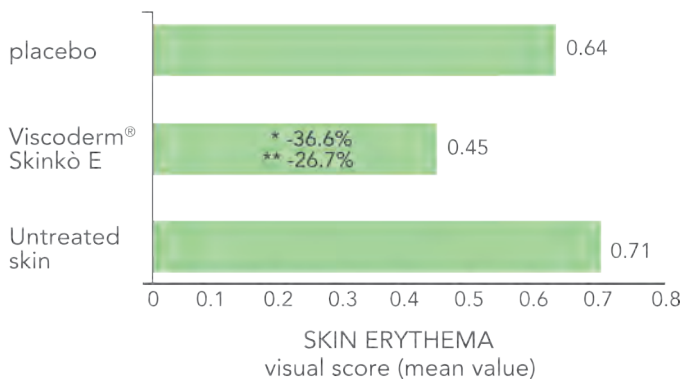

Tukey Test


P<0.05 (*) vs untreated skin

P<0.05 (**) vs placebo

Die klinisch und statistisch signifikante Abnahme der sichtbaren Spots im Vergleich zu unbehandelter Haut und Placebo zeigt die Lichtschutzwirkung von VISCODERM® Skinko E.

TIEFENHYDRATION:

SIGNIFIKANTE STEIGERUNG DER TIEFENHYDRATION

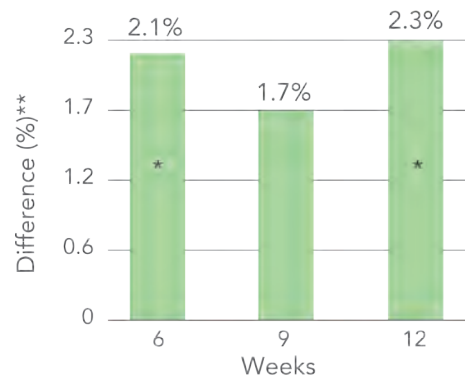

** Variation oberflächliche und tiefe Flüssigkeitszufuhr

* Dunnett-Test (P <0,05 vs T0)

Modifiziert von Sparavigna et al. 2015

Der positive Unterschied zwischen oberflächlicher und tiefer Hydratation gemessen in TW12 belegt die erhöhte Hydratation durch VISCODERM® Skinko E.

VISCODERM®

SKINCARE



VISCODERM® CREAM

Herrlich leichte Creme für die tägliche Hautpflege zu Hause. Sie wirkt antioxidativ, schützend und feuchtigkeitsspendend. Besonders nach ästhetischen Hautbehandlungen hilft VISCODERM® Cream Hautstress zu lindern. Die serumartige Konsistenz zieht sehr schnell ein, hinterlässt keinen Film auf der Haut und ist wunderbar unter Puder oder Make-Up zu tragen. Enthält Kiefernrintenextrakt PYCNOGENOL®, Coenzym Q10, Panthenol, Folsäure und Bisabolol.



VISCODERM® PHOTOPROTECTION

Die neue Generation des Sonnenschutzes. Pflege und besonders hoher Schutzfaktor 50+ (bei UVA & UVB-Strahlung)⁶⁾. Die Kombination aus MSM, Hyaluronsäure, Ectoin und Sonnenschutzfilter wirkt den durch UV-Strahlung verursachten Schäden erfolgreich entgegen, beruhigt die Haut und versorgt sie gleichzeitig mit Feuchtigkeit. VISCODERM® Photoprotection ist das spezifische Präparat zur Vermeidung von Schäden durch ultraviolette Strahlung. Das Produkt beugt Hyperpigmentierungen vor.



VISCODERM® COVER UP

Eine leichte, gut deckende und sich dem natürlichen Hautton anpassende Foundation zur Kaschierung von Hautunregelmäßigkeiten und Beruhigung der Haut. Steril entnehmbar durch den Pumpspender. Speziell für die empfindsame und beanspruchte Haut nach ästhetischer Behandlung konzipiert. Viscoderm® CoverUp ist auch für die tägliche Anwendung zu Hause bestens geeignet. Es enthält Arnika und Hyaluronsäure und ist in den Farbtönen „light“ und „dark“ erhältlich.



VISCODERM® PEARLS

Ergänzend zu PROFHILO & Co. runden die Viscoderm Pearls als Nahrungsergänzung das Schönheits-Konzept HYDROLIFT® Action von IBSA ab. Viscoderm® Pearls bieten eine kontinuierliche und wirksame Unterstützung bei der Regeneration und Reparatur des Bindegewebes. Hochwirksame Stoffe wie Antioxidantien, Collagen und Hyaluronsäure können zur Verbesserung der Festigkeit und Elastizität sowie der Versorgung mit Feuchtigkeit der Haut beitragen.

Enthält hydrolysiertes Kollagen, Pycnogenol® und Coenzym Q10 (Ubichinon). Packung mit 30 Kapseln (Verzehrempfehlung 1 bis 2 Kapseln pro Tag). Gluten- und Lactosefrei.

PROFHILO[®]

HAENKENIUM[®]

MULTI-ACTION CREME MIT ANTIOXIDATIVER WIRKUNG



Die ideale Ergänzung zu Bioremodellierung mit PROFHILO zur täglichen Anwendung und Pflege zu Hause. PROFHILO HAENKENIUM[®] stärkt die Barrierefunktionen der Haut, versorgt sie mit Feuchtigkeit, lindert Hautirritationen und hält die zelluläre Vitalität aufrecht. Kleine Fältchen werden gemildert und die Elastizität verbessert.

PROFHILO HAENKENIUM[®] vereint einen Hyaluronsäure-Komplex (HA) mit dem patentierten Extrakt aus Haenkenium (Salvia Haenkei). Salvia Haenkei, auch bekannt als Gamelensalbei, schützt vor freien Radikalen, besitzt eine starke antioxidative Wirkung und kann so die Haut vor vorzeitiger Alterung sowie gegen Umwelteinflüsse schützen. Klinische Studien haben gezeigt, dass Gamelensalbeiextrakt die Zellalterung verlangsamen kann.

KLINISCHE STUDIEN BESTÄTIGEN⁵⁾:

ANSTIEG DER NATÜRLICHEN ZELLULAREN
ANTIOXIDATIVEN AKTIVITÄT UM
MEHR **ALS 40%** NACH NUR ZWEI WOCHEN

DEUTLICHE **VERBESSERUNG DER**
ELASTIZITÄT NACH NUR ZWEI WOCHEN

REDUZIERUNG DER FALTENTIEFE UM
10% NACH NUR ZWEI WOCHEN
UND UM **30%** NACH DREI MONATEN

DERMATOLOGISCH GETESTED AUF SENSITIVER HAUT

EVERYONE IS A MASTERPIECE.



1) V. Frelì, P. Pescio, Evaluation of local tolerability and increase of the elastic fibres and collagen after intracutaneous injection of three injectable fillers, Eurofins Biolab 2013; 84:5-12

2) Fabbrocini et al. 2016_Confocal microscopy and imaging profilometry A new tool aimed to evaluate aesthetic procedures.

3) Dr. Beatini, PRIME-Journal 2012, S. 56/57

4) Dr. Sparavigna, PRIME-Journal 2014, ab S. 62

5) IBSA Brochure PROFHILO 2019

6) VISCODERM® Photoprotection product leaflet, Data on File General Topics 2012

my Beauty
SHOPPING *aging in balance*

GROSSHANDEL FÜR PRODUKTE
DER ÄSTHETISCHEN MEDIZIN
Exklusiv-Distributor des Herstellers IBSA
für Deutschland und Österreich

Stürzerstraße 12a . D-83043 Bad Aibling

Fon: +49 (0) 80 61.9 38 30 38

Fax: +49 (0) 80 61.9 38 30 31

e-mail: info@prophilo.net

www.prophilo.net & www.mybeautyshopping.net